

Pro^ephy®

MASQUE KN95 / FFP2

**4 PLIS
NON TISSÉ BLANC
PLIABLE**

Usage Unique

4 couches de protection

Filtration multi-effets



CE

GEH

Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr



> Utilisation

Il protège celui qui le porte, à la fois contre l'inhalation de gouttelettes et des particules en suspension dans l'air qui pourraient contenir des agents infectieux. Résistant à la poussière à haute efficacité.

Utilisation pour secteurs Médico Social, Epahd, Collectivités, Visiteurs et au niveau des zones exposées protégeant le porteur contre différents risques.

> Mode d'emploi

Mode d'emploi :

Effectuer une FHA (friction alcoolique) ou se laver les mains à l'eau et au savon.
Placer le masque sur le visage, la barrette nasale sur le nez.

Tenir le masque et passer les élastiques derrière la tête sans les croiser.
Pincer la barrette nasale avec les deux mains pour l'ajuster au niveau du nez.
Vérifier que le masque soit bien mis. Pour cela il convient de contrôler l'étanchéité.
(Fit Check) après ajustement, ne plus toucher le masque avec les mains.

> Caractéristiques

- Plis : 4 couches
- Matière : Tissu non tissé, matériau fondu à haute efficacité.
- Couleur : Blanc
- Dimensions : 177 x 95 mm

Modèle : Masque de protection KN 95 =N95=FFP2

Norme : Standard EN149:2001+A1 2009

Certificat N°4Q200328R.ZBB0078

Filtration : pénétration maximale 6 % avec fuite totale maximale de 8 %.
CE Directive(s) Européenne R2016/425 équipement de protection individuelle.

> Précautions d'emploi

Après usage, retirer le masque en saisissant par l'arrière les élastiques sans toucher la partie avant du masque.

Les masques à usage unique doivent être jetés immédiatement après chaque utilisation dans une poubelle avec couvercle munie d'un sac plastique et d'un couvercle car il n'est pas possible de le décontaminer. Effectuer une friction avec une solution hydroalcoolique ou se laver les mains à l'eau et du savon après retrait. Un masque se change dès qu'il devient humide et toutes les 4 heures. Se conformer à la notice d'utilisation. Dans tous les cas, elle sera inférieure à 8 heures sur une seule journée.

Ce masque n'est pas un dispositif médical mais un équipement de protection individuelle à usage unique.

> Logistique

Masque	
Conditionnement	10 Boites x 100 pcs
Colis	1000 pcs
Colis dimensions extérieures (cm)	66 x 66 x 39 H
Poids brut	8,5 kg
Code produit	342144

Tolérance maxi de 5 %. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION